

COMMENT DOIS-JE UTILISER L'INHALATEUR BREZTRI® AEROSPHERE®?


Balayez le code QR pour regarder une vidéo qui montre, étape par étape, comment utiliser votre inhalateur BREZTRI AEROSPHERE.



Votre inhalateur BREZTRI AEROSPHERE se présente sous la forme d'une **cartouche pressurisée** qui s'insère dans une pièce de plastique appelée **dispositif d'actionnement**; à l'une de ses extrémités se trouve un **embout buccal** protégé par un capuchon. Sur le dessus de la cartouche, vous verrez également un **indicateur de doses**.

Lecture de l'indicateur de doses

L'indicateur de doses indique une dose en moins après chaque vaporisation de médicament. Voir ci-dessous pour en savoir plus sur les composantes fonctionnelles de l'indicateur de doses.

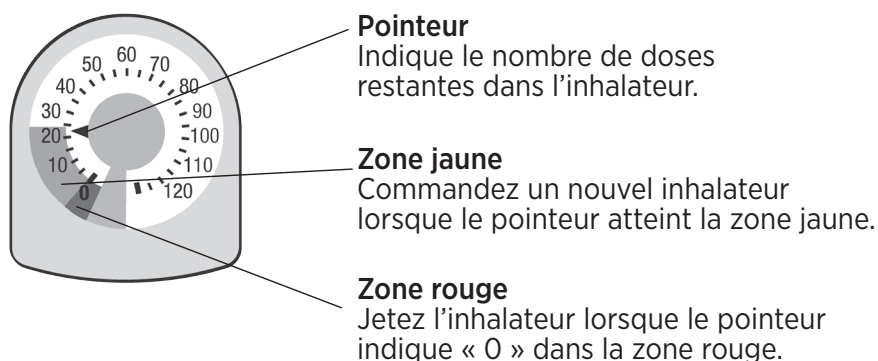

La fenêtre d'affichage de l'inhalateur de 30 jours indique 120 et celle de l'inhalateur de 14 jours indique 60.

N'essayez pas de prendre une inhalation lorsque le pointeur indique « 0 », puisque vous ne recevrez pas une dose complète.




BREZTRI®
AEROSPHERE®
budésonide / glycopyrronium /
fumarate de formotérol dihydraté en
suspension pressurisée pour inhalation


Amorcer l'inhalateur

Amorcer l'inhalateur garantit que vous recevrez la bonne quantité de médicament lorsque vous l'utiliserez. Avant d'utiliser votre inhalateur pour la première fois, amorcez-le en suivant les étapes ci-dessous.

1. Retirez le capuchon de l'embout buccal en pinçant de chaque côté et en tirant.

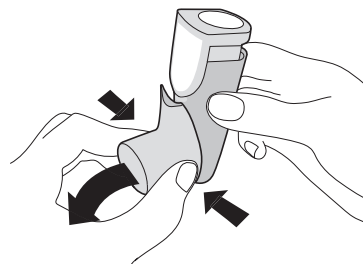

2. Agitez bien l'inhalateur et vaporisez **1 dose d'essai** dans l'air, dans la direction opposée à votre visage. Répétez cette étape 4 fois, en agitant l'inhalateur avant chaque vaporisation.

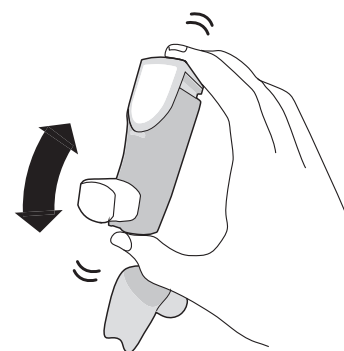


Total de 4 doses d'essai avec agitation avant chaque vaporisation

Réamorcez l'inhalateur dans les cas suivants :

- Après avoir rincé le dispositif d'actionnement
- Si vous l'échappez
- Si vous ne l'avez pas utilisé pendant plus de 7 jours

Pour réamorcer, vaporisez **2 doses d'essai**, en agitant l'inhalateur avant chaque vaporisation.

Total de 2 doses d'essai avec agitation avant chaque vaporisation

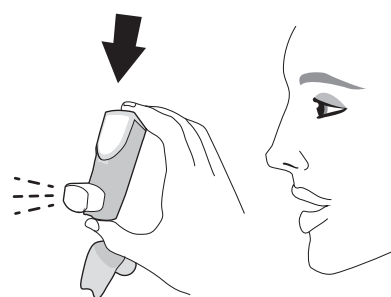


Des doses supplémentaires sont prévues pour l'amorçage.
Ne sautez pas l'étape d'amorçage.

Utilisation quotidienne de l'inhalateur

Suivez les consignes ci-dessous pour inhaler votre médicament. Prenez **2 inhalations (bouffées) le matin** et **2 inhalations le soir**.


1. Retirez le capuchon de l'embout buccal. **Examinez l'embout buccal avant de l'utiliser et retirez toute substance étrangère.**

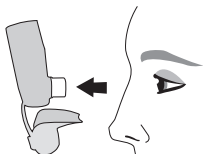


3. Répétez l'étape 2 pour la seconde dose.




2. Agitez bien l'inhalateur avant chaque vaporisation.

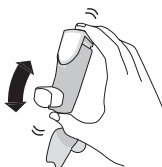


4. Remettez le capuchon de l'embout buccal en place.

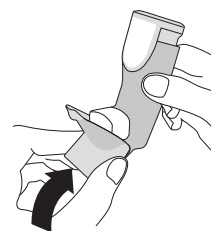

Videz tout l'air de vos poumons.

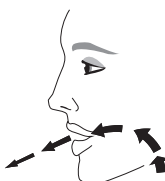


5. Rincez votre bouche avec de l'eau. Recrachez l'eau. **Ne l'avalez pas.**

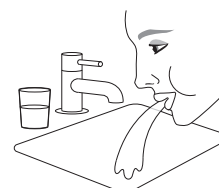


Placez l'embout buccal dans la bouche et serrez les lèvres autour de celui-ci.



Commencez à inspirer profondément et lentement tout en vaporisant **1 inhalation**. Continuez d'inspirer le plus longtemps possible.

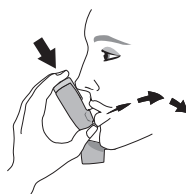

Retenez votre respiration le plus longtemps possible, jusqu'à **10 secondes**.

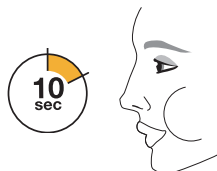


Souvenez-vous de **vous rincer la bouche avec de l'eau** après les 2 inhalations pour prévenir une infection fongique.

Rinçage hebdomadaire


Rincez le dispositif d'actionnement jaune toutes les semaines afin que le médicament ne s'y accumule pas et ne bloque pas la vaporisation par l'embout buccal. Nous vous recommandons de noter la journée du nettoyage dans votre calendrier ou de prévoir un rappel dans votre téléphone.

- Rincez le dispositif d'actionnement jaune toutes les semaines.
- La cartouche ne doit pas être mouillée.
- Réamorcez l'inhalateur après le rinçage.

1. Retirez la cartouche et mettez-la de côté. **La cartouche ne doit pas être mouillée.**

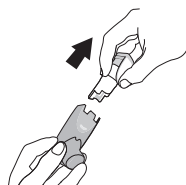

2. Retirez le capuchon de l'embout buccal.

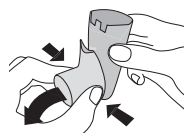


3. Faites couler de l'eau tiède par l'embout buccal pendant 30 secondes, puis par l'ouverture supérieure du dispositif d'actionnement pendant 30 secondes. **Rincez pendant 60 secondes au total.**




4. Secouez le dispositif pour retirer autant d'eau que possible. **Ne le séchez pas avec une serviette ni un mouchoir.**




5. Examinez l'intérieur du dispositif d'actionnement et de l'embout buccal pour vérifier s'il y a des accumulations de médicament. Si vous en voyez, répétez les étapes 3 à 5.

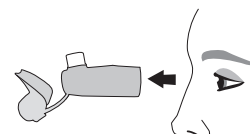


6. Laissez sécher à l'air, de préférence pendant toute la nuit. **Ne remettez pas** la cartouche dans le dispositif d'actionnement s'il est encore mouillé.

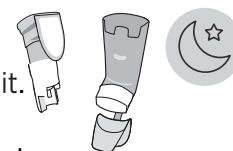

7. Lorsque le dispositif est sec, **remettez d'abord le capuchon de l'embout buccal**, puis insérez doucement la cartouche dans le dispositif.

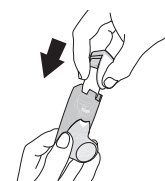

8. Réamorcez l'inhalateur en vaporisant **2 doses d'essai**, et en agitant l'inhalateur avant chaque vaporisation.

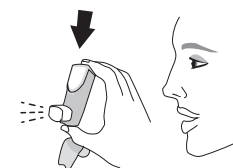

Total de 2 doses d'essai avec agitation avant chaque vaporisation

Autres renseignements importants

Rappels importants



- Pour inhalation orale seulement.
- Amorcez votre inhalateur BREZTRI AEROSPHERE avant de l'utiliser pour la première fois.
- Rincez le dispositif d'actionnement jaune toutes les semaines.
- Prenez 2 inhalations (bouffées) de médicament le matin et 2 inhalations le soir.
- Ne réutilisez pas le dispositif d'actionnement et ne l'utilisez pas avec les cartouches de médicaments d'autres inhalateurs.
- Ne percez pas la cartouche et ne la jetez pas dans le feu ou dans un incinérateur.

Conservation de l'inhalateur



- Conservez l'inhalateur à la température ambiante (entre 15 et 30 °C), dans un endroit sec.
- **Ne le conservez pas dans un environnement humide, comme une salle de bain.**
- Gardez votre inhalateur et tous les médicaments hors de la portée et de la vue des enfants.

Mise au rebut de l'inhalateur



- Après avoir pris la dernière dose, jetez l'inhalateur en respectant les directives locales.
- Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment le jeter, renseignez-vous auprès de votre pharmacien, qui vous dira quoi faire avec les médicaments dont vous n'avez plus besoin.
- Aidez à protéger l'environnement en vous débarrassant de vos médicaments correctement.

BREZTRI®, AEROSPHERE®, et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, toutes utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

© AstraZeneca Canada Inc. 2024
1004 Middlegate Road, bureau 5000, Mississauga (Ontario) L4Y 1M4

